

Allergan
Aesthetics
an AbbVie company

Allergan Aesthetics Beauty
<https://www.allerganbeauty.jp/>



SKINVIVE 患者さん向けWEBサイト
<https://www.juvedermvista.jp/skinvive/patient/>



クリニック情報記載欄

販売名：スキンバイブ by ジュビダームビスタ
医療機器承認番号：30200BZX00389A01

2026年1月作成
JP-SKV-250017

スキンバイブで
治療を受けられた患者さまへ



監修 | 秋葉原スキンクリニック院長
堀内 祐紀 先生

[医療従事者の皆さまへ]
本冊子は、スキンバイブ by ジュビダームビスタ®で
治療を受けられる患者さまに、医療機器に
関する情報を正しくご理解いただき、適切な
治療を受けていただくための資料として
作成されています。

写真はイメージです

肌質改善*に

SKINVIVE

スキンバイブは、
肌質改善*を目的とした
国内で薬事承認された
ヒアルロン酸注入材です

※皮膚状態(保水性、弾力性等)の改善のこと



point 1 保水性
1回の注入で保水性が最大9ヵ月持続します¹⁾

point 2 弾力性(ハリ)
弾力性の向上が期待できます

point 3 小じわの改善
肌の小じわを改善し、なめらかな肌を目指します

1) スキンバイブ by ジュビダームビスタ® 電子添文

肌の内側に直接架橋ヒアルロン酸*を届けることで、うるおいを保ち、ハリや弾力を与えます¹⁾

- 架橋ヒアルロン酸を肌の内側の真皮に直接届けることで、肌のうるおい保持力を高めます¹⁾

- さらに、肌の水分を通す通り道であるアクアポリン3を活性化させることで、肌の奥から水分量を増やし、コラーゲンの産生を促進。これにより、内側から整った、みずみずしい肌へと導きます²⁾


- 保水性は最大9ヵ月持続します¹⁾

※非架橋ヒアルロン酸は、速やかに代謝される³⁾ため、肌に長く留まらせるために架橋したヒアルロン酸

1) スキンバイブ by ジュビタームビスタ® 電子添文

2) Draelos Z. J Clin Aesthet Dermatol. 2012;5(7):53-56.


3) 1. Chylińska N et al. Gels. 2025;11(4):281.

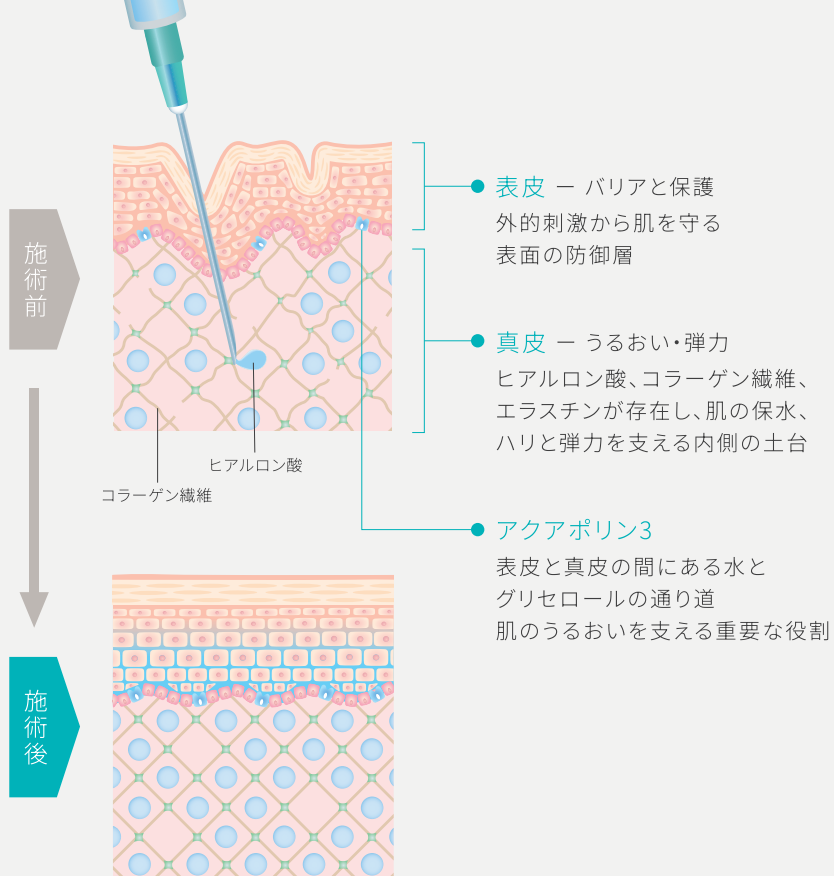

イメージ図

スキンバイブの満足度

施術後1ヵ月から満足度の向上が見られ、
9ヵ月後も75.8%の方で満足度が向上しています。
さらに、再施術を行うことで、より満足度が向上します¹⁾

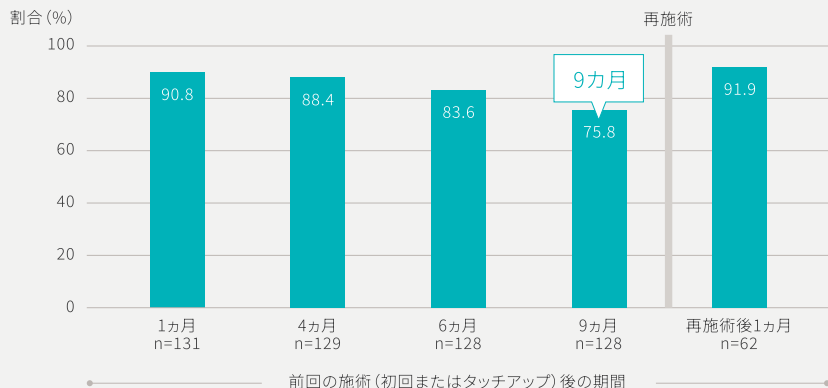

【対象】 検証済み皮膚粗さ評価スケール (ASRS) による医師評価で、両頬のスコアが2または3 (中等度または重度) の成人 (18歳以上) 131例 【方法】 前向き単一施設単一群臨床試験。被験者全例の頬、額、および頸部 (任意) にジュビダームボライト XC による施術を行った。タッチアップは必要に応じて、初回施術後30日前後に実施し、最終施術後9ヵ月間フォローアップを行った。9ヵ月時に任意で再施術を行い、その後1ヵ月間フォローアップを実施した。また、治療への満足度を評価するため、被験者はベースライン、1ヵ月目、4ヵ月目、6ヵ月目、9ヵ月目、再治療後1ヵ月目に、FACE-Q皮膚満足度尺度に回答した。

1) Ogilvie P et al. J Cosmet Dermatol. 2020; 19(5): 1065-1070.

治療後に気をつけること

—— 治療後の過ごし方

- 24時間は血行を促進する行為を避けてください
飲酒、激しい運動、日光浴、サウナなど
- 痛みや赤みが気になるときは、
注入部位を冷やすと和らぐことがあります

—— 以下のような症状が見られたら

- 内出血 …………… 数日で自然に消えます
- 凹凸 (おうとつ) …… 気になる場合は、
やさしくマッサージしてなじませてください
- 血管の詰まり …… まれに起こることがあります。注入直後に強い痛みが生じたり、皮膚が白色や紫色に変色するなどの異変が見られた場合は、速やかに医師に連絡してください

気になることがあれば、クリニックにご相談ください

本日の治療に関して

施術日


年 月 日

治療に関するお伝え事項



例) 内出血が起こりそうな部位 など

次回の来院目安

年 月 日頃

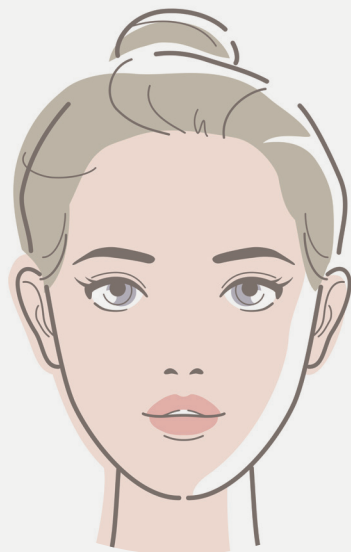

あなたへのおすすめ施術

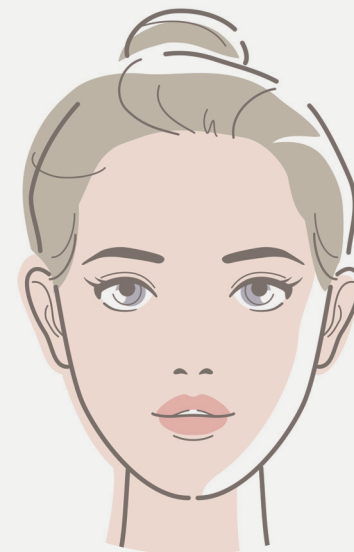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



SKINVIVE

BY JUVÉDERM VISTA®



肌は、第一印象や自信に
影響を与えます

スキンバイブは、
肌質改善のためのヒアルロン酸
内側からうるおい、ハリを与え、
健康的な肌質へ導きます

いきいきとした自分へ。自信に満ちた毎日を

